

# OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker eMail: sales@omb-meditech.com  
CH-9606 Bütschwil URL: www.omb-meditech.com  
SWITZERLAND Tel.: +41-71-982-7201  
Fax: +41-71-982-7202

MWST-Nr. 553 733



## Vapocid®-Tray System



Oktober 2003

Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin

## Informationsrundschriften · Information Bulletin

### Instrumententräger - Montage

#### Vapocid®-Tray System


- ↳ Instrumententräger
- ↳ (für ENDO-Instrumente)

Zur richtigen Montage gehen Sie bitte wie folgt vor:

Platzieren Sie den Instrumententräger an der gewünschten Position und legen Sie den Traybehälter mit dem Instrumententräger auf den Kopf.



Legen Sie zuerst die Unterlagscheibe auf, danach die Rippenscheibe (Wölbung nach oben) und befestigen die Schraube.

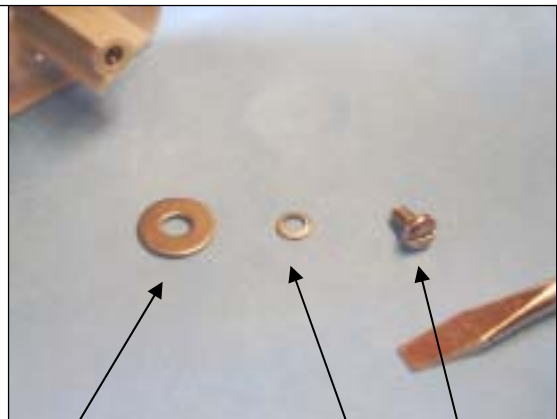

- Unterlagscheibe
- Rippenscheibe
- Schraube

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen  
**OMB MEDITECH AG**