

OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker eMail: sales@omb-meditech.com
CH-9606 Bütschwil URL: www.omb-meditech.com
SWITZERLAND Tel.: +41-71-980-0206
MWST-Nr. 553 733 Fax: +41-71-980-0205



Vapocid®-Tray System





November 2006

Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin

Informationsrundschriften · Information Bulletin

Instrumentenhalter - Einfaches Anbringen am Tray-Boden

1) Traybehälter (Öffnung nach unten)

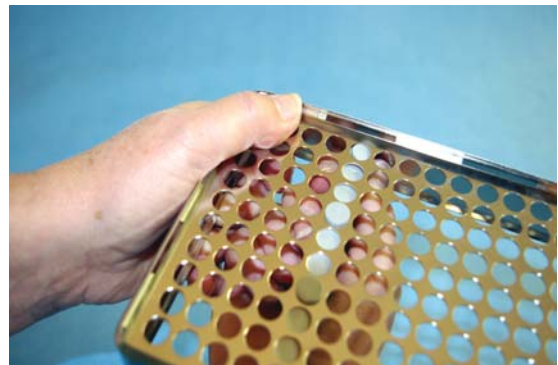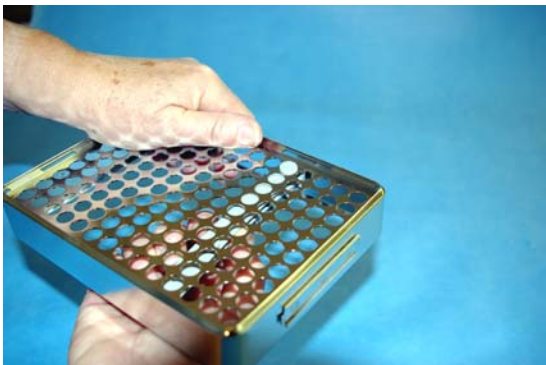

Einfache Handhabung

Halten Sie den Tray-Behälter mit einer Hand mit der Öffnung nach unten und plazieren den Instrumentenhalter mit der anderen Hand durch Drück- und Schwenkbewegungen in die entsprechende Lochung vom Tray-Boden. So sehen Sie sofort, ob die Instrumentenhalterung (alle Noppen) richtig eingerastet sind.

Art.-Nr. Bezeichnung / Info

38717 Instrumentenhalter standard
1 Stück (2-Pack) für 1/2 Trays (bis 9 Instrumente)
2 Stück (2-Pack) für 1/1 Trays (bis 18 Instrumente)

38417 Instrumentenhalter kurz
1 Stück (2-Pack) für 1/4 Trays